

de *Similasan Heuschnupfen Spray* ist ein nicht medizinischer, konservierungsmittelfreier, tief eindringender Spray zur Nasenspülung, der von Kindern und Erwachsenen angewendet werden kann. Er wirkt, indem er den Schleim verflüssigt und Fremdpartikel wie Staub, Pollen und Allergene wegspült. Dies trägt dazu bei die Verstopfung zu lindern und die normale Atemfunktion wiederherzustellen.

Similasan Heuschnupfen Spray verursacht keine Abhängigkeit und kann zusammen mit anderen Mitteln verwendet werden.

Empfohlener Gebrauch:

Ein nicht medizinischer Spray zur Nasenspülung, der dazu beiträgt, die Verstopfung der Nase bei Sinusitis, verstopfter Nase, Heuschnupfen, Allergien und postoperativer Nasenpflege zu lindern.

Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren.

Bei 15 °C / 59 °F bis 30 °C / 86 °F lagern.

Verwendung:

Halten Sie den Behälter in einem beliebigen Winkel und führen Sie die Düse vorsichtig in jede Nasenöffnung ein. Halten Sie die Düse während 1–2 Sekunden gedrückt.

Vorsichtsmassnahmen:

Die Verwendung des Sprays durch mehr als eine Person kann zur Verbreitung von Infektionen führen. Reinigen Sie daher die Düse mit Seifenwasser und spülen Sie sie nach jedem Gebrauch mit heissem Wasser aus.

Achtung:

- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen, sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
- Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.
- Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:

Similasan AG, Chriesiweg 6, 8916 Jona, Switzerland
Tel. +41 (0)56 649 90 50, www.similasan.com

 Aurena Laboratories AB, Fjärrviksvägen 22,
SE-653 50 Karlstad, Sweden

CE 0413

REF 1017-5

STERILE R



89



15 °C — 30 °C

LOT



Siehe Schachtelboden / Voir fond de la boîte / Vedi fondo della scatola

Medizinprodukt / Dispositif médical / Dispositivo medico